

Набор интродукторов Kimberly-Clark* MIC*, MIC-KEY*

«Золотые правила» по уходу за трубкой:

Уход непосредственно после процедуры:

- **Ведите наблюдение за жизненными показателями:** в течение первых часов после процедуры очень важно следить за жизненными показателями пациента: сознание, пульс и кровяное давление. Они могут указывать на внутреннее кровотечение.
- **Контролируйте положение трубки:** запишите в медицинскую карту длину и диаметр канала, а также объем воды, введенной в баллон.
- **Приступайте к энтеральному питанию:** для удаления избыточного воздуха из желудка, подсоедините к питательной трубке дренажный мешок. Энтеральное питание может быть возобновлено через 12 часов в случае отсутствия противопоказаний и осложнений.

Ежедневный уход:

- **Уход за стомой:** ежедневно обрабатывайте область стомы и «бамперы» Saf-t-Pexu с помощью водорастворимого дезинфектанта. Ежедневно обследуйте область стомы и «бамперы» Saf-t-Pexu на предмет выявления признаков инфицирования (например, покраснение или раздражение) или болей. В случае появления подобных признаков, свяжитесь со своим лечащим врачом.
- **Предотвращение миграции «бамперов»:** ежедневно поворачивайте гастростомические трубки MIC* и MIC-KEY* вокруг их оси. Не следует поворачивать ни еюнальные питательные трубки, ни полиуретановые «бамперы» Saf-t-Pexu.
- **Наблюдение за трубкой:** раз в две недели проверяйте содержимое баллона. Удаляйте жидкость из баллона с помощью шприца. Заново вводите удаленную жидкость и заполняйте баллон до первоначального объема воды. Проверяйте трубку на предмет чистоты. Важно поддерживать трубку чистой и тщательно ее промывать. При необходимости используйте аппликатор с ватным наконечником для очистки порта для введения питания.

■ **Гигиена пациента:** пациенту нельзя принимать ванну, пока «бамперы» Saf-t-Pexu находятся на коже. Можно принимать душ.

■ **«Бамперы» Saf-t-Pexu:** обычно нити рассасываются через 2-3 недели, и «бамперы» Saf-t-Pexu отпадают. С этого момента ежедневно мойте участок кожи водой с мылом, после чего тщательно вытирайте насухо. Свяжитесь с врачом-консультантом в случае появления покраснения кожи или отека. Если «бамперы» не отпадут сами через 3–4 недели, их может удалить врач-консультант.

■ **Назначение питательных смесей:** проверяйте положение питательной трубки MIC* или MIC-KEY* с помощью pH-индикаторной бумаги. Эту процедуру следует выполнять каждый раз, когда Вы подсоединяете новый пакет с питанием, если есть сомнения в правильном положении трубки, а также, по меньшей мере, 3 раза в день. В случае сомнений: правильное положение может быть подтверждено с помощью рентгена. Всегда промывайте трубку водой перед и после кормления и ввода лекарств.

■ **Очистка и замена удлинительного набора MIC-KEY*:** после каждого использования промывайте удлинительный набор теплой водой с мылом. Тщательно прополощите и дайте высохнуть на воздухе. Храните до следующего использования в воздухонепроницаемом контейнере или в пакете типа «зип-лок» (с застежкой на молнии). Удлинительные наборы MIC-KEY* являются одноразовыми и должны заменяться, как минимум, каждые 2 недели.

■ **Случайное извлечение:** немедленно свяжитесь с врачом. Незамедлительно введите трубку в стому заново, чтобы сохранить канал открытым, а также фиксируйте трубку к коже липкой лентой. Надувание баллона должно быть выполнено врачом, желательно под эндоскопическим контролем для предотвращения повреждения канала.

■ **Замена трубки:** Следуйте инструкциям Вашего врача по замене трубки в целях предотвращения непредвиденного смещения трубок.

 **Важное примечание:** Вышеуказанные инструкции являются всего лишь рекомендациями по надлежащему уходу за набором интродукторов MIC* и MIC-KEY*. Им можно следовать только в случае отсутствия инструкций от лечащего врача. Инструкции от компании Кимберли-Кларк ни при каких условиях не могут главенствовать над медицинскими инструкциями или инструкциями по уходу. Ответственность за лечение несет Ваш лечащий врач.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в компанию Кимберли-Кларк по следующему номеру: +7 495 725 43 83 – или посетите наш сайт www.kchealthcare.com

Дистрибьютор в РФ: ООО «АРТ-ЭКО», тел./факс: +7 499 968 01 51(50), www.art-eco.pro

www.KCDigestiveHealth.com

* Зарегистрированный товарный знак или товарный знак компании Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (c) 2011 KCWW. Все права защищены. HC905/00-RU

АРТ-ЭКО

 **Kimberly-Clark**

*Trusted Clinical Solutions**